

AFKOOKAPPARAAT TECHNOFLUX BL-625

1. INLEIDING

Deze opmerkingen geven de nodige informatie voor de juiste installatie, gebruik en onderhoud van het toestel.

GARANTIE

De garantie geldt 12 maanden vanaf datum van levering tot de klant.

Door een verkeerd gebruik van het apparaat of door gebruik van een ongeschikt chemisch product vervalt de garantie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productreferentie : BANOEO100

Tankinhoud : 600 ml


Verwarmingsvermogen : 600W

Buitenafmetingen : 150 x 200 mm


Spanning : 220V/50 HZ

Gewicht : 970 gr

- 1) Deksel buitenkant
- 2) Deksel binnenkant
- 3) Ondersteuning binnentank
- 4) Interne tank
- 5) Externe tank
- 6) Verwarmingsplaat
- 7) Thermische sonde
- 8) Basis set
- 9) Dashboard
- 10) Scherm

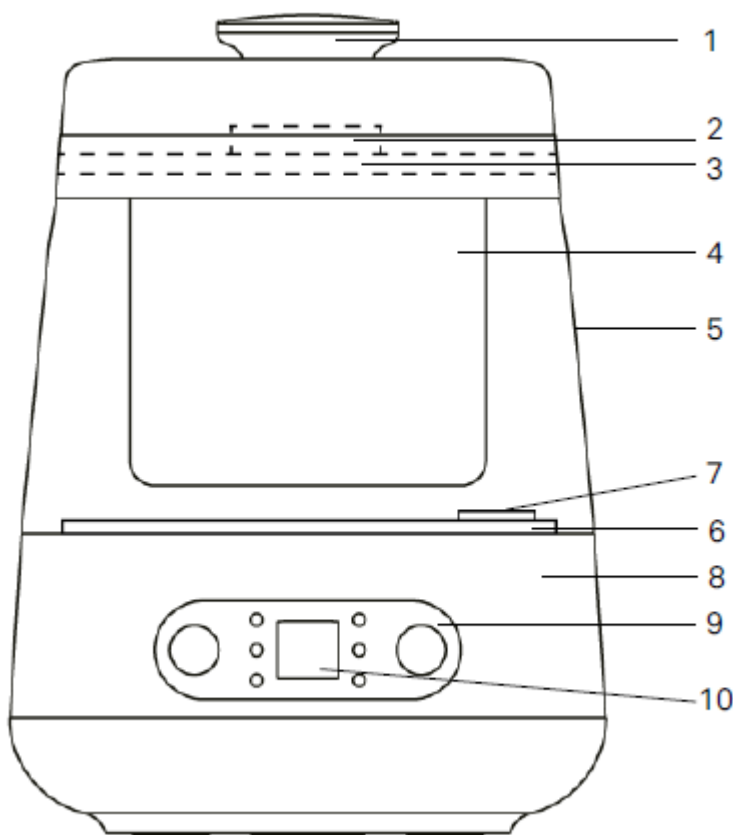

2. HANDLEIDING OM TE PROGRAMMEREN

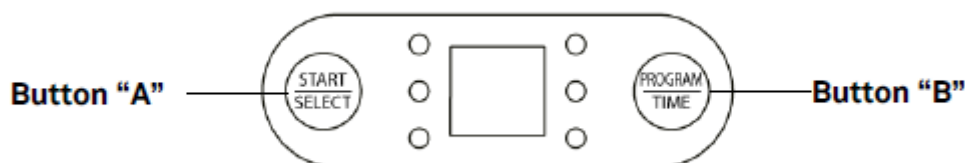

Knop A : Heeft verschillende functies waarmee we het apparaat kunnen opstarten en doorheen de 6 vooraf vastgestelde programma's kunnen navigeren. Het heeft ook de unit stop functie.

Voor de startfunctie : één druk op de knop volstaat om het apparaat automatisch te starten op het eerste programma.

Navigatiefunctie : als u deze ingedrukt houdt, kunt u naar een van de 6 programma's gaan en deze selecteren en vervolgens te starten.

Uitschakelfunctie : kan op twee manieren :

Eerste manier : indien het apparaat op een programma staat wordt het apparaat uitgeschakeld door er eenmaal op te drukken.

Tweede manier : als we 7 maal drukken, schakelt het programma over op programma 6 als we nog eens drukken (de 7^{de} maal) dan wordt het apparaat uitgeschakeld.

Knop B : Hiermee kunt u de wachttijd programmeren voordat het programma wordt gestart.

Wachttijdfunctie : Voor we het apparaat starten, drukken we eerst op knop B om de uren dat we willen wachten te selecteren en door op knop A te drukken kunnen we het gewenste programma selecteren.

Vooraf ingestelde programma's : deze programma's bestaan uit twee parameters uitgedrukt in tijd en temperatuur. Wanneer we in het programma zijn, licht de rode LED op.

N°1 Duurt in totaal 24 minuten op een temperatuur van 99°C.

N°2 Duurt in totaal 18 minuten op een temperatuur van 99°C.

N°3 Duurt in totaal 48 minuten op een temperatuur van 99°C.

N°4 Duurt in totaal 90 minuten op een temperatuur van 99°C.

N°5 Duurt in totaal 108 minuten op een temperatuur van 99°C.

N°6 Duurt in totaal 12 uur op een temperatuur van 45°C.

3. HANDLEIDING

Hoe te gebruiken :

1. Giet tussen 300 et 400 ml water in de externe tank (deel n°5).
2. Voorbereiding beitsbad
 - Neem de interne tank (4), vul deze met 500 ml water en voeg 30 gr Wilacid toe.
 - Dek af met het binnen deksel (2).
 - Plaats het in de externe tank en bedek het geheel met het externe deksel (1).
 - Laad vervolgens programma nr 2 op en wacht tot deze 80°C bereikt heeft. Op dit ogenblik is het beitsbad klaar voor gebruik, druk op A om te beëindigen en te voorkomen dat de temperatuur stijgt.

GEbruik PROGRAMMA N° 6 WAARMEE U DE IDEALE WERKTEMPERATUUR HEBT VOOR DE HELE WERKDAG.

OPMERKING : voor het gebruik van andere toepassingen, altijd de handmatige bediening gebruiken.

4. WAARSCHUWING EN RISICO'S

- ***Voorzichtig de stukken laten vallen in de binnentank.***
- ***Giet geen zuur of beitsmiddel in het water van de buitentank.***
- ***Gebruik het apparaat niet zonder de binnentank en zonder water.***
- ***Overschrijd het aangegeven niveau in beide reservoirs niet.***
- ***Overschrijd de maximum temperatuur van 80°C niet voor beitszout.***
- ***Vervang het warme water niet maar wacht tot het koud is.***